




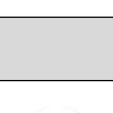



## Emploi du masque ultrafiltrant

Enfilage	
	Frictionner les mains avec le produit hydro-alcoolique Ouvrir le sachet
	Déployer le masque par ses bords
	Placer le masque sous le menton et la barrette métallique sur l'arête du nez
	Ajuster l'élastique inférieur au-dessous des oreilles et à la nuque
	Ajuster l'élastique supérieur au-dessus des oreilles et sur le sommet du crâne <small>(ne pas croiser les élastiques)</small>
	Adapter la barrette nasale à la forme du nez avec les <u>deux</u> mains
Vérification de l'étanchéité	
	Vérifier l'ajustement en plaçant les deux mains en coquille sur le masque <ul style="list-style-type: none"><li>- expirer très fort</li><li>- il ne doit y avoir aucune fuite sur les pourtours du masque</li></ul>
Retrait du masque	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Frictionner les mains avec le produit hydro-alcoolique</li><li>- Prendre les élastiques de contention sur les côtés,</li><li>- Les passer par-dessus la tête</li><li>- Retirer le masque vers l'avant</li><li>- Eliminer le masque</li><li>- Frictionner les mains avec le produit hydro-alcoolique</li></ul>