

## DETERGENTS-DESINFECTANTS ADMIS AUX HUG - Version destinée à l'affichage

- Pour le bio-nettoyage des sols, des autres surfaces, des points d'eau, des sanitaires
- Pour la désinfection des surfaces, des équipements et des dispositifs médicaux

### DECONEX® INSTRUMENT PLUS – détergent-désinfectant par immersion (trempage)

Solution à diluer dans un récipient fermé

- Solution 2 %, soit 20 ml pour 980 ml d'eau froide (conservation 7 j. ; changer en cas de souillure visible)
- Protection personnelle : gants de ménage, masque médical, protection oculaire, tablier imperméable  
Evacuation de la solution dans l'évier, le vidoir ou équivalent

### DES-SUR® - détergent-désinfectant par application (0,2 % ammonium quaternaire ; 50 % alcool)

Solution prête à l'emploi

Chiffon ou essuie-main imbibé de DES-SUR®, à appliquer sur les surfaces sèches, laisser sécher (sans rincer)

### ETHANOL 70 % - Désinfectant par application

Solution 70 % prête à l'emploi

Tampon non stérile imbibé d'ETHANOL 70 %, à appliquer sur la surface sèche à désinfecter, laisser sécher

### STERINOVA® - désinfectant par immersion (trempage) – usage pédiatrique uniquement

Comprimé effervescent à diluer : 1 comprimé de 500 mg de STERINOVA® pour 2.3 l d'eau (conservation 24h maximum)

Dans un bac avec couvercle : immersion totale du matériel (nettoyé à l'eau au préalable) pendant 30 minutes au minimum, rinçage non recommandé mais possible (voir *Intrahug / Raccourcis / Procédures de soins / Pédiatrie et tek-Ped 7 Entretien du matériel avec STERINOVA®*)

Evacuer la solution utilisée dans l'évier, le vidoir ou équivalent et rincer abondamment le bassin d'évacuation à l'eau

### SURFANIOS Premium - détergent-désinfectant par application (remplace le produit ANIOSURF Premium)

- Lorsque disponible, dilution prête à l'emploi à prélever du doseur à SURFANIOS Premium
- Solution à préparer : dilution de 20 ml pour 8 l d'eau = 0.25 %
  - Après dilution, si la solution disposée dans un seau et utilisée : conservation jusqu'à 24h au maximum ; élimination en cas de souillures visibles
  - Après dilution, si la solution est maintenue dans un récipient fermé et étiqueté, conservation jusqu'à 7 j. ; le récipient est à rincer et à retraiter par immersion avant chaque nouveau remplissage

Chiffon imbibé de SURFANIOS Premium, à appliquer sur les surfaces, laisser sécher sans rincer (5 minutes sont nécessaires au temps d'action ; ce temps correspond au temps de séchage du produit)

Protection personnelle : gants de ménage, masque médical, protection oculaire lors de la préparation ; gants de ménage lors de l'utilisation

Evacuation de la solution utilisée dans l'évier du vidoir ou équivalent ; rincer le bassin d'évacuation et les surfaces inox (robinets, grilles d'écoulement, etc.) avec de l'eau

### TRISTEL FUSE SURFACES - détergent-désinfectant par application

Deux solutions (base et activateur) à mélanger dans le sachet et plonger le sachet ouvert dans 5l. d'eau froide pour en diluer le contenu

- Solution stable 24 heures
- Chiffon imbibé de **TRISTEL FUSE SURFACES**, à appliquer sur les surfaces ; laisser sécher (sans rincer)

Protection personnelle : gants de ménage, masque médical, protection oculaire, tablier imperméable

Evacuation de la solution résiduelle dans l'évier, le vidoir ou équivalent; rincer le bassin d'évacuation et les surfaces inox (robinets, grilles d'écoulement, etc.) avec de l'eau

- Pour les informations sur les indications à l'usage des produits, consulter le document intégral *Détergents-désinfectants admis aux HUG et à usage dans les lieux de soins* sous : <https://vigigerme.hug.ch/entretien-de-lenvironnement-des-equipements-et-dispositifs-medicaux>

Dernière mise à jour : décembre 2023

